

ANNEXE 3.1 : Les masques de protection respiratoire jetables FFP2 (anti-gouttelettes) (« Filtering facepiece particles ») 30 juin 2008 -

Porteurs des masques	Soignants en contact avec des cas possibles ou confirmés de grippe : Personnel de l'officine
Rôle(s) de ces masques	Protéger le porteur du masque contre les risques liés à l'inhalation de particules solides ou liquides, c'est-à-dire d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne ou par la voie des gouttelettes.
Caractéristiques	Equipement de protection individuelle <ul style="list-style-type: none"> - composés d'une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d'un dispositif de filtration - nombreux modèles de formes différentes - présence ou non d'un joint en mousse - présence ou absence d'une soupape expiratoire (La soupape améliore le confort du porteur mais l'air expiré n'est pas filtré.)
Réglementation européenne (Directive européenne 89/686/CEE)	Indications suivantes inscrites de manière indélébile sur l'emballage final : <ul style="list-style-type: none"> - le sigle « CE » suivi du numéro d'un organisme notifié (obligatoire) ; - le numéro et l'année de la norme « EN 149 : 2001 » (fortement recommandés) ; - l'indication de la classe d'efficacité : FFP2. (FFP3 apportant une protection encore supérieure)(Efficacité du filtre et fuite au visage)
Circonstance(s) d'utilisation	Lors des phases de transmission inter humaine pré-pandémique (Situations 4A, 4B, 5A et 5B) et pandémique (Situation 6)
Conseils de stockage et d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A stocker à l'abri de l'humidité, du froid, de la chaleur et du soleil et date de péremption de l'ordre de trois ans. ▪ Respecter les consignes précises suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Evitez la barbe car perte d'efficacité. - Ecartez les bords du masque. - Selon le modèle, ouvrez le raidisseur ou courbez-le pour lui donner une forme concave qui s'adaptera plus facilement aux contours de votre nez. - Prenez les deux élastiques d'une main, tirez-les un peu vers le haut et passez le bas du masque sous le menton. - Passez les deux élastiques au-dessus de la tête. Placez l'élastique inférieur au-dessous de la nuque et l'élastique supérieur sur le sommet arrière du crâne. - Ajustez le masque pour que ses bords s'appuient bien sur le visage. - Ils doivent englober à la fois le menton et le nez. - A usage strictement unique. - Durée d'utilisation maximale : entre trois à huit heures (voir les recommandations du fabricant) mais à jeter avant dès que mouillé, souillé ou mal positionné sur le visage. - L'enfermer dans un sac plastique avant de le jeter dans une poubelle placée à cet effet. - Se laver soigneusement les mains.
Liste des fournisseurs	Consulter la fiche : « Liste des fabricants français de masques FFP2 ».

ANNEXE 3.2 :

Liste des fabricants français de masques FFP2

Liste non exhaustive provenant du Ministère de la Santé et des Solidarités (mise à jour le 06.02.06)

Leurs masques disposent de la norme EN 149 ainsi que de la norme française.
Ces fabricants ne sont pas des fournisseurs en direct pour les officines.

- **BACOU-DALLOZ***
ZI de la Gare
22 940 Plainel
France
Tél : 02 96 42 92 42
Fax : 02 96 42 05 54
Contact : Roland Fangeat et Jean Noël Bellier
www.bacou-dalloz.com
- **DELTALYO***
ZA des Ferrières
Rue de la Chaudanne
69 290 Grézieu-la-Varenne
France
Tél : 04 78 57 80 00
Fax : 04 78 57 25 00
Contact : Vianney Brillat
www.deltalyo.com
- **DELTA PLUS***
ZI La Peyrolière-BP 140
84 405 APT Cedex
France
Tél : 04 90 74 20 33
Fax : 04 90 74 72 47
Contact : Guy Pons
www.deltaplus.fr
- **MACO DEVICES LAB***
Rue Lorthois
59 420 Mouvaux
France
Tél : 03 20 24 84 91
Fax : 03 20 01 73 03
Contact : Marie Line Girard
- **MACOPHARMA**
200, chaussée Fernand Forest
59 200 Tourcoing
France
Tél : 03 20 11 84 00
Fax : 03 20 11 84 03
Contact : Monsieur Vezia
www.macopharma.com
- **MSA GALLET***
ZI Sud- BP 90
01 400 Châtillon sur Chalaronne
France
Tél : 04 74 55 01 55
Fax : 04 74 55 47 99
Contact : Olivier Thomasset
- **PAUL BOYE**
1564, route de Lagardelle
31 810 Le Vernet
France
Tél : 05 34 48 21 02
Contact : Jacques Boyé
www.paulboye.com
- **SACLA***
ZI des Risarges
420, rue de la Dombes
01 700 Les Echets
France
Tél : 04 72 26 23 24
Fax : 04 72 26 23 20
Contact : Berryl Pilot
- **THUASNE**
118-120, rue Marius AUFAN
92 307 Levallois-Perret
France
Tél : 01 41 05 92 86
Contact : Monsieur Arduin
www.thuasne.fr

Les fournisseurs* ont été sélectionnés par l'Unité centrale d'achats publics (UCAP). Sur le site du Ministère de la Santé et des Solidarités, Dossier grippe aviaire : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/sommaire.htm figurent également les listes officielles de producteurs mondiaux de masques FFP2.